

速乾性スプレー式潤滑・防錆剤

ステンミルク Smooth

器材に直接スプレーすることにより、簡便に潤滑・防錆が行えます

優れた潤滑・防錆効果！

手間と場所いらず！

優れたコストパフォーマンス！

特徴

- ・簡便に使用できるスプレー式タイプです。
- ・潤滑・防錆槽など置く場所をとりません。
- ・高い浸透力により潤滑に即効性があります。
- ・アルコール含有により乾燥を促進します。
- ・1本で約600回スプレーできるので経済的です。

使用方法

- ① ボックスロック部や可動を有する箇所など潤滑・防錆処理したい箇所にスポット的にスプレーしてください。
 - ② スプレー後、器材を可動させ本液をなじませてください。
 - ③ スプレー後の器材は乾燥機もしくは常温放置で充分乾燥させ、滅菌処理を行ってください。
▶ 洗浄後ススギをした器材の潤滑・防錆剤としてご使用ください。
▶ 組み立て時の器材の軋みにご使用ください。軋みは器材早期劣化の原因になります。
- ※処理後の器材は充分乾燥させてください。滅菌不良の原因になります。

<使用上の注意>

- 使用時はメガネ、マスク及びゴム手袋等の保護具を着用する。●換気の良い所で使用し、目より高い所へのスプレーは避ける。また、火気の付近で絶対に使用しない。
- ステンレス製以外の金属器材（アルミニウムや真鍮などの非鉄金属製品には不向きです）及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があるので、予め試験をしてから使用する。●排出の際は、大量の水に希釈して廃棄する。●高温・直射日光を避けた涼しいところに保管する。また、保管時などにおいてスプレーノズル付近は清潔な状態にしてください。●子供の手の届かない所に保管する。●使用期限は未開封における表示です。開封後はできるだけ早くご使用ください。

ご注意

次の器具には使用を控えてください。●体内植え込み器材（インプラント等） ●樹脂、ゴム、ガラス等の防錆処理を必要としない医療器材 ●薬液投与を目的とした医療器材（注射筒、注射針、薬盃、チューブ等）

〔応急処置〕●眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し（眼球とまぶたの隅々までよく洗う）、医師の処置を受ける ●皮膚などに付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受ける。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲む。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を受ける。なお、本品は飲食できません。●吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、うがいをし、安静・保温に努める。異常を感じるならば医師の処置を受ける。



【容量 200ml】（2本入り）

火気厳禁

第4類アルコール類
危険等級Ⅱ 水溶性

<主成分>

ポリグリセリン脂肪酸エステル
（食品添加物）
ソルビタン脂肪酸エステル
（食品添加物）
アルコール
pH…中性