


新品の器具を初めて使用する前に行う作業

器具に付着している工業用油を除去する(簡易油抜き)

ご用意
頂くもの

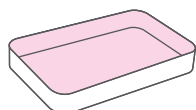

器具が入る容器



スポンジ



ブラシ



専用の中性洗剤




洗剤の参考例

1

40℃程度のお湯に、専用の中性洗剤を入れた洗剤液をつくり、新品の器具をできるだけ開いた状態で、30分程浸漬してください。

※ご使用になる洗剤の使用方法に従ってください。

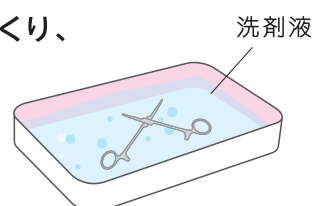


2

1の浸漬後、中性洗剤をつけたスポンジやブラシで擦り洗った後、流水でよくすすいで(図1)ください。器具の可動部分やネジ部、関節部分や図2の○部分は、特に念入りに洗ってください。擦り洗いは2回行うと効果的です。洗浄後は、速やかに器具の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させてください。

「超音波洗浄器」をお持ちの場合は、擦り洗い2回終了後、超音波洗浄を行うとより効果的です。

【例】水1Lに対し、「スーパーLM-CAE」を20mlと「メタルケア」20mlを加えた溶液に器具を入れ超音波洗浄してください。その後、水で洗い製品の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させてください。

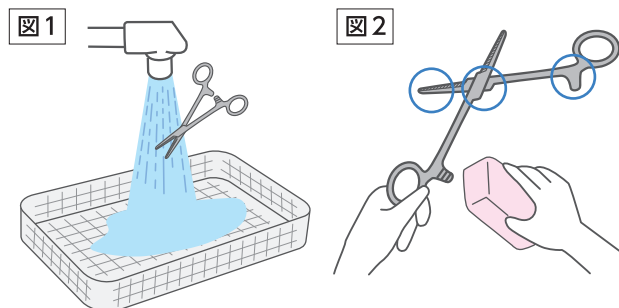

3

器具の可動部分やネジ部、関節部分に医療用水溶性潤滑油を注油してください。



4

滅菌処理(高圧蒸気滅菌)を行ってください。

1～4の作業を行うと、器具の耐食性が向上します。

※上記は簡易油抜き方法です。専門スタッフや設備がない場合の参考にしてください。

※器具を滅菌しない場合、上記の作業は不要です。

※既定のガイドラインがある場合は、そちらに従ってください。

※変色や錆、熱ヤケが起きた場合は、専用の薬剤やワイヤーブラシ等で落としてから、再度1～4を行ってください。