

スポット除錆剤



～簡便に使用できる泡状タイプ除錆剤～

Sクリーン REMOVE はステンレス器材などに発生した錆を強力・迅速に除去する泡状のスプレー式除錆剤です。



<特徴>

- ・簡便に使用出来るスプレー式タイプ。
- ・錆が溶解すると紫色に変色します。
- ・泡状のため、しっかりと器材にSクリーン REMOVE が留まり浸透します。
- ・スプレー（噴霧）で危惧される作業への飛散を軽減します。

<使用方法>



- ・錆が見られる部分へ直接泡状にスプレーし、その後ブラッシング又は水ですすぎを行ってください。
- ・スプレー後の放置時間は5～10分（最大15分まで）を目安としてください。

※反応時間は目安です。錆びが除去されていれば速やかに取り出し、必要以上に放置しないようにしてください。また、錆が確認されない器材には使用しないでください。腐食・変色することがあります。

※除錆処理後の器材は速やかに水で十分にすすぎ、乾燥させてください。

※表面処理剤（除錆剤や熱ヤケ除去剤）の使用後には連続使用しないでください。腐食・変色することがあります。

例えば、熱ヤケ除去剤など酸性薬剤で処理した器材は、必ず100℃で1時間以上乾燥させた後に本剤を使用してください。ご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。

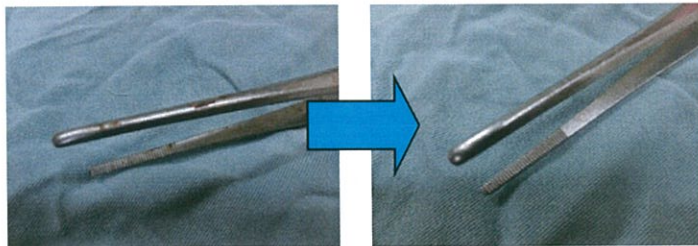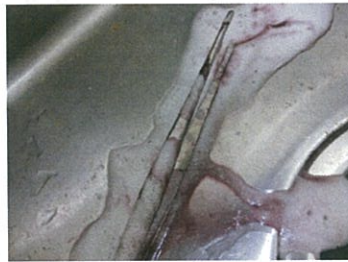

<主成分>

グリコール酸塩化合物
界面活性剤
水溶性溶剤
pH調整剤

pH…中性

<使用上の注意>

●使用時はメガネ、マスク及びゴム手袋等の保護具を着用する。●ご使用前には予め、変色や劣化等の影響がないことを確認してください。●ステンレス製以外の金属器材は変化をきたす場合があるので使用しない。また、シリコン、テフロン、ポリプロピレン等は使用できませんが、各種素材は多様ですから、予め試験をしてから使用する。●排出の際は、少量の場合は大量の水に希釈して排出する。多量の場合は廃棄物処理業者に依頼する。●高温・直射日光を避けた涼しい所（1℃以上）に密栓して保管する。●僅かに赤紫色の着色を認める場合がありますが、使用上問題はありません。●子供の手の届かない所に保管する。
〔応急処置〕●眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し（眼球とまぶたの隅々までよく洗う）、医師の処置を受ける。●皮膚などに付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受ける。●誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲む。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を受ける。なお、本品は飲食できません。●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、うがいをし、安静・保温に努める。異常を感じるならば医師の処置を受ける。

1508